

Testname:HSV IgG 1/2 MEDAC (PKS)
Kurzname:HSV_IgG

Testnummer:
Behring Nr.:

Definiert am:
Testmethode: ELISA
Systemkontrolle
Probenvolumen [µl]: 50
Max. Vorink. RT [min]: 15
Einheit: AU/ml
Umrechnungsfaktor: 1.000
Nachkommast.: 2
Anz. gültige Ziffern: 4
Codes für ext. Kommunikation:
Testcode 1:
Testcode 2:
Testcode 3:
Testplatte: Rundbodenplatte - Behring

Durchführung

0	1
Anz. Waschschr.:	Anz. Waschschr.:
Aufheizart: Kein Aufheizen	Standzeit [s]: 5
Inkubationszeit [min]: 60 ± 5	Nach jedem Waschschr.
37° C	Waschlösung: Extern
	Reagenz: Konj. HSV IgG
	Reagenzvolumen [µl]: 60
	Aufheizart: Kein Aufheizen
	Inkubationszeit [min]: 60 ± 5
	37° C
2	3
Anz. Waschschr.:	Anz. Waschschr.:
Standzeit [s]: 5	Reagenz: Medac Stopplösung
Nach jedem Waschschr.	Reagenzvolumen [µl]: 100
Waschlösung: Extern	Aufheizart: Kein Aufheizen
Reagenz: Medac TMB Substrat	Inkubationszeit [min]: 0
Reagenzvolumen [µl]: 50	
Aufheizart: Kein Aufheizen	
Inkubationszeit [min]: 30 ± 2	
37° C	

Meßwellenlänge [nm]: 450
Referenzwellenlänge [nm]: 650
Zul. unterer MW Ref.wellenlänge [mE]: 0
Zul. oberer MW Ref.wellenlänge [mE]: 0

Beladungsschema

Startverdünnung: 1 : 1.000 Schritte: 1 Verdünnungsfaktor: 1 : 1.000

A1	NEG	Medac HSV IgG neg. Kontrolle
B1	CAL	Medac HSV IgG Kalibrator
C1	CAL	Medac HSV IgG Kalibrator
D1	POS	Medac HSV IgG pos. Kontrolle

Auswertung

Doppelbest.: Keine
Cutoff: $(OD_{\text{obere Grenze}} / SW_{\text{Kalibrator}}) * MW(CAL)$
Wiederholungsgrenzen
obere: $(OD_{\text{obere Grenze}} / SW_{\text{Kalibrator}}) * MW(CAL)$
untere: $(OD_{\text{untere Grenze}} / SW_{\text{Kalibrator}}) * MW(CAL)$
Auswertung: Besondere Formel
Formel: $b / (a / (SAM * SW_{\text{Kalibrator}} / MW(CAL)) - 1)$

NEG
Oberer Schwellenwert [E]: 0.150
Unterer Schwellenwert [E]: 0.000
Max. Anzahl der Ausreißer: 0

CAL
Oberer Schwellenwert [E]: 9.999
Unterer Schwellenwert [E]: $GW_{\text{Kalibrator}}$
Max. Anzahl der Ausreißer: 0

Dokument: "Reagenz - Sollwertkontrollen".



Sollwe

Medac

Nr.: 0

Name: Medac PK

Kennziffer: 8103

Vergebene Kennziffern...

SamplerID: POS

Kurzname: POS

Die Einheit der Kontrollen ist mit der Einheit, die in der Testdefinition angegeben wurde identisch.

Obere Grenze: YY

Untere Grenze: XX

Codes für ext. Kommunikation:

estcode 1:

estcode 2:

estcode 3:

Speichern

Alias

Validierung

Papierkorb