

Testname: VZV IgM ELA MEDAC (PKS)
Kurzname: VZV_IgM

Testnummer:
Behring Nr.:

Definiert am:
Testmethode: ELISA
Systemkontrolle
Probenvolumen [μ l]: 50
Max. Vorink. RT [min]: 15
Einheit: Index
Umrechnungsfaktor: 1.000
Nachkommast. : 2
Anz. gültige Ziffern: 4
Codes für ext. Kommunikation:
Testcode 1:
Testcode 2:
Testcode 3:
Testplatte: Rundbodenplatte - Behring

Durchführung

0
Anz. Waschschr. 0
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 60 ± 5
37° C

1
Anz. Waschschr. 3
Standzeit [s]: 5
Nach jedem Waschschr. Schritt
Waschlösung: Extern
Reagenz: VZV IgM ELA
Reagenzvolumen [μ l]: 60
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 60 ± 5
37° C

2
Anz. Waschschr. 3
Standzeit [s]: 5
Nach jedem Waschschr. Schritt
Waschlösung: Extern
Reagenz: Medac TMB Substrat
Reagenzvolumen [μ l]: 50
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 30 ± 2
37° C

3
Anz. Waschschr. 0
Reagenz: Medac Stopplösung
Reagenzvolumen [μ l]: 100
Aufheizart: Kein Aufheizen
Inkubationszeit [min]: 0

Meßwellenlänge [nm]: 450
Referenzwellenlänge [nm]: 650
Zul. unterer MW Ref.wellenlänge [mE]: 0
Zul. oberer MW Ref.wellenlänge [mE]: 0

Beladungsschema

Startverdünnung: 1 : 1.000 Schritte: 1 Verdünnungsfaktor: 1 : 1.000

A1	NEG	Medac VZV IgM neg. Kontrolle
B1	NEG	Medac VZV IgM neg. Kontrolle
C1	POS	Medac VZV IgM pos. Kontrolle

Auswertung

Doppelbest.: Keine
Cutoff: MW(NEG)+0.14
Wiederholungsgrenzen
obere: 1.1*Cutoff
untere: 0.9*Cutoff
Auswertung: Besondere Formel
Formel: SAM/Cutoff

NEG
Oberer Schwellenwert [E]: 0.170
Unterer Schwellenwert [E]: 0.000
Max. Anzahl der Ausreißer: 0

POS
Oberer Schwellenwert [E]: 9.999
Unterer Schwellenwert [E]: 0.620
Max. Anzahl der Ausreißer: 0