




DBS Antikörper -

optimierte Protokolle für IHC-Vollautomaten

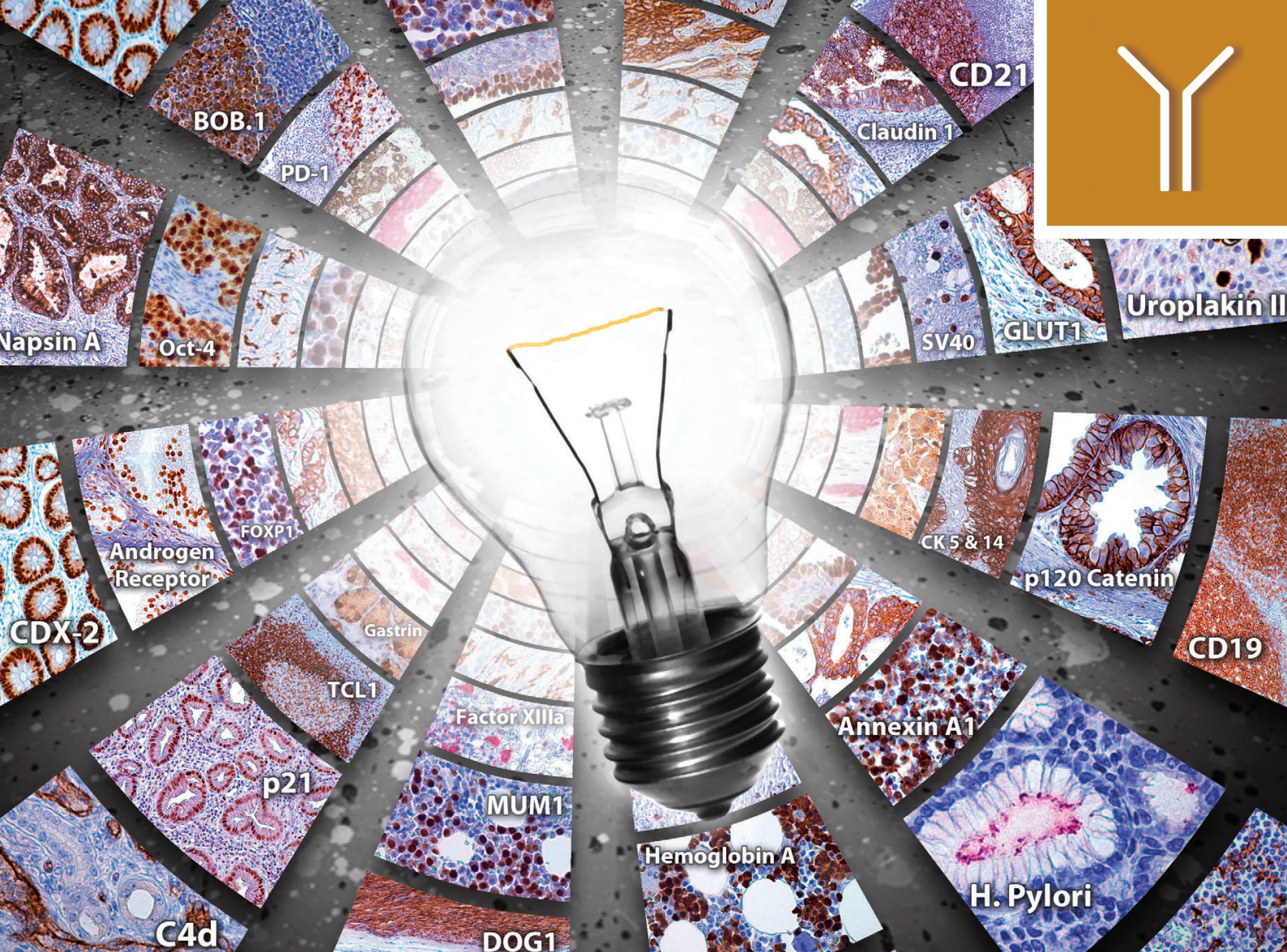

Vom Sehen
zum Erkennen.


medac

Protokolle für DBS Antikörper auf IHC-Vollautomaten

Antikörper	Kat-Nr.	Klon	Ver-dün-nung	Vor-behanlung	Inkubations-zeit	Detektion System	Instrument
Aktin SM	MOB001	1A4	1:200	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
AMACR (Racemase) P504s	RP134	poly	1:50	*H2(10)	15 min.	Refine	Leica BOND
AFP	RP001	poly	1:100	CC1	32 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark
AFP	Mob129	C3	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
Amyloid B (beta)	Mob410	BAM-10	1:50	H2(40) 95°C	30 min.	Refine	Leica BOND
Androgen Rezeptor	Mob245	AR441	1:100	CC1	20 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
Androgen Receptor	Mob245	AR441	1:500	H2(20) 95°C	30 min.	Refine	Leica BOND
Bcl-10	Mob442	151	1:50	*H1(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
Beta-HCG	RP007	poly	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
CA-125	Mob110	OV185:1	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
Calcitonin	RP050	poly	1:200	*H1(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
CD117 / c-kit	RP063	poly	1:100	CC1	30 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark Ultra
CD117 (c-Kit)	RP064	poly	1:100	*H2(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
CD3	PDM186	LN10	RTU	CC1	32 min 36°C	Ultra View	Benchmark
CD4	PDM093	1F6	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark
CD4	PDM093	1F6	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD5	PDM095	4C7	RTU	CC1	34 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD8	PDM094	144B	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD10	PDM107	56C6	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD15	PDM098	MY1	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD21	Mob028	1F8	1:10	E2(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
CD21	Mob028	1F8	1:300	E2(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
CD21	PDM122	1F8	RTU	E(Trypsin) 15'	15 min.	Refine	Leica BOND
CD23	PDM143	1B12	RTU	CC1	40 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD30	PDM018	Ber-H2	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD30	Mob032	Ber-H2	1:20	H2(30) 95°C	30 min.	Refine	Leica BOND
CD31	Mob034	JC70A	1:400	H2(30) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
CD31	PDM020	JC70A	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD34	Mob098	QBEND/10	1:200	CC1	30 min 37°C	Ultra View	Benchmark XT
CD34	Mob098	QBEND/10	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
CD34	PDM050	QBEND/10	RTU	CC1	40 min 37°C	Ultra View	Benchmark
CD45 RO T-Cell	Mob043	UCHL-1	1:400	CC1	30 min 37°C	Ultra View	Benchmark XT
CD61 Platelet Glycoprotein IIIa	PDM064	Y2/51	RTU	Low (30) 97°C	20 min 18°C	DAB	DAKO OMNIS
CD68	Mob094	PG-M1	1:200	*H2(20)	30 min.	Refine	Leica BOND
CD68	Mob094	PG-M1	1:40	E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
CMV	PDM075	CCH2&DDG9	RTU	Enzyme P1	32 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark
CMV	Mob049	CCH2&DDG9	1:50	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
CMV	PDM075	CCH2&DDG9	RTU	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
Cyclin D1 (bcl-1)	RMAB003	SP4	1:10	*H2(30)	30 min.	Refine	Leica BOND
Cyclin D1 (bcl-1)	RMAB003	SP4	1:25	*H2(30)	30 min.	Refine	Leica BOND
Cyclin D1 (bcl-1)	RMAB003	SP4	1:25	*H2(30)	30 min.	Refine	Leica BOND
Cyclin D1 (bcl-1)	RMAB003	SP4	1:50	*H2(30)	15 min.	Refine	Leica BOND

Antikörper	Kat-Nr.	Klon	Ver- dün- nung	Vor- behanlung	Inkubations- zeit	Detektion System	Instrument
Cytokeratin	PDM181	CAM5.2	RTU	Enzyme P1	24 min 37°C	Ultra View	Benchmark
Cytokeratin 5	Mob361	XM26	1:25	CC1	22 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
Cytokeratin 6	Mob361	XM27	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
Cytokeratin 5 & 14	Mob433	XM26 & LL002	1:100	CC1	30 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
Cytokeratin 5 & 14	Mob433	XM26 & LL003	1:50	Boric Acid	32 min 37°C		Nexus
Cytokeratin 5 & 14	Mob433	XM26 & LL004	1:50	CC1	32 min 37°C	Ultra View DAB v3	Benchmark XT
Cytokeratin 8	Mob054	35bH11	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
Cytokeratin 13	Mob443	KS-1A3	1:100	High(30) 97°C	20 min 18°C	DAB	DAKO OMNIS
Cytokeratin 13	Mob443	KS-1A3	1:100	High(30) 97°C	20 min 32°C	Envision Flex	DAKO OMNIS
Cytokeratin 14	Mob186	LL002	1:20	CC1	26 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
Cytokeratin (Pan-)	Mob052	MNF116	1:1000	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
Cytokeratin (Pan-)	Mob052	MNF116	1:500	*E1(10)	30 min	Refine	Leica BOND
Cytokeratin (Pan-)	PDM116	MNF116	RTU	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
Cytokeratin 18	PDM164	DC10	RTU	*H2(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
Cytokeratin 20	PDM049	KS20.8	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
Cytokeratin 20	MOB123	Ks20.8	1:40	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Cytokeratin 7	Mob057	OV-TL 12/30	1:40	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
Cytokeratin 7	Mob057	OV-TL 12/30	1:50	*H2(30)	15 min.	Refine	Leica BOND
Desmin	Mob060	D33	1:50	*H1(30)	30 min.	Refine	Leica BOND
Epithelial Antigen	PDM131	Ber-EP4	RTU	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
Ep-CAM, ESA	PDM131	Ber-EP4	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark XT
Ep-CAM, ESA	Mob406	Ber-EP4	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
ERCC-1	Mob336	Ber-EP4	1:50	CC1	32 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark XT
ERCC-1	Mob336	Ber-EP4	1:50	CC1	60 min 37°C	Ultra View	Benchmark
Factor XIIIa	Mob321	AC-1A1	1:400	High(30) 97°C	20 min 32°C	DAB	DAKO OMNIS
Gastrin	PDR027	Poly	RTU	CC2	20 min 37°C	Ultra View	Benchmark
GFAP	Mob064	6F2	1:50	*H1(10)	15 min.	Refine	Leica BOND
GFAP	PDR028	poly	RTU	*H1(10)	15 min.	Refine	Leica BOND
Glut-1	RP128	poly	1:100- 1:200	CC2	32 min 37°C		Benchmark XT
Glycophorin A	Mob066	JC159	1:100	*H1(30)	15 min.	Refine	Leica BOND
Glycophorin A	PDM124	JC159	RTU	---	15 min.	Refine	Leica BOND
HBsAG	Mob125R	5C3	1:20	CC1	30 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
Hepatocyte Specific Ag (Hepar-1)	Mob426	OCH1E5	1:100	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
Hepatocyte Specific Ag (Hepar-1)	PDM162	OCH1E6	RTU	*H2(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
Herpes simplex Virus I + II	PDRM001	poly	1:600	H2(20) 95°C	Prot. J	Refine Red	Leica BOND
HPV16, L1	Mob394	CAMVIR-1	1:300	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark Ultra
HSV Cocktail	PDRM001	rab/mouse	1:7	H2(10) 95°C	8 min.	Refine	Leica BOND
HHV-8	MOB395R	LN53	1:100	H2(45)	Rat_HRP	Refine	Leica BOND
HHV-8	MOB395R	LN53	1:200	H2(20) 95°C		Refine	Leica BOND
IgA	RP020	poly	1:5000	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
IgG	RP023	poly	1:5000	H2(30) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND

Antikörper	Kat-Nr.	Klon	Ver- dün- nung	Vor- behan- lung	Inkubations- zeit	Detektion System	Instrument
IgM	RP024	poly	1:6000	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Insulin	MOB234	K36aC10	1:2000	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Insulin	MOB234	K36aC10	1:400	*H1(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
Kappa	RP025	poly	1:1000	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Ki67	RMAB004	SP6	1:200	CC1	24 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
Ki67	RMPD004	SP6	RTU	CC1	24 min 36°C	Ultra View	Benchmark
Leukaemia, Hairy Cell	PDM024	DBA.44	RTU	*H2(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
Melan-A / MART-1	PDM153	A103	RTU	CC1	32 min 42°C	Ultra View	Benchmark
Melanoma	MOB421	PNL2	1:25	*H1(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
MSH-6	Mob429	44	1:25	H2(30) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
MSH-6	Mob429	44	1:25	*H2(30)	30 min.	Refine	Leica BOND
MSH6	Mob429	44	1:25	Boric Acid	32 min 37°C		Nexus
MSH6	PDM147	44	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark
MSH6	Mob429	44	1:50	CC1	32 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
MSH6	Mob429	44	1:50	CC1	44 min 37°C	Ultra View DAB v3	Benchmark XT
Napsin A (KCG1.1)	PDM154	44	RTU	CC2	24 min 37°C	Ultra View	Benchmark
Neurofilament	Mob080	2F11	1:80	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Oct-4	Mob464	NRG1.1	N/A	CC1	6 min 37°C	Ultra View Red AP	Benchmark
p16	Mob575	JC2	1:50	H2(20)95°C	30 min.	Refine	Leica BOND
p16	Mob575	JC2	1:100	H2(20)95°C	30 min.	Refine	Leica BOND
p16	Mob575	JC2	1:100	CC1	60 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
p16	Mob575	JC2	1:200	CC1	32 min 37°C	Ultra View DAB	Benchmark
p16	PDM575	JC2	RTU	High(30) 97°C	20 min 32°C	Envision Flex	DAKO OMNIS
p40	RP163	poly	1:100	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
p40	RP163	poly	1:30	H2(40) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
p53	Mob082	DO-7	1:350	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
p63	RMAB086	DBR16.1	1:500 - 1:800	*H2(20)	30 min.	Refine	Leica BOND
Pancreatic Polypeptide	RP030	poly	1:25	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Pancreatic Polypetide	RP030	poly	1:500	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
Perforin	MOB555	5B10		H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
PIN Cocktail	PDR057	Cocktail	RTU	*H2(30)	*IHC Prot. K	Chromoplex	Leica BOND
PIN Cocktail	Mob427		1:50	buffer pH 9.0	32 min 37°C		Nexus
PRAME	RMAB109	EPR20330	1:100	High(30) 97°C	20 min 32°C	DAB	DAKO OMNIS
PSA	Mob548	35H9	1:100	High(30) 97°C	20 min 18°C	DAB	DAKO OMNIS
S-100	MOB377	4C4.9	1:1500	H2(20) 95°C	30 min.	Refine	Leica BOND
S-100	MOB377	4C4.9	1:500	H2(20) 95°C	Prot. J	Refine Red	Leica BOND
S-100	RP035	poly	1:200	*E2(10)	30 min.	Refine	Leica BOND
S-100	PDR008	poly	RTU	*E1(5)	15 min.	Refine	Leica BOND
Synptophysin	RMPD018	SP11	RTU	CC1	32 min 37°C	Ultra View	Benchmark
TTF-1	Mob285	8G7G3/1	1:20	H2(20) 95°C	15 min.	Refine	Leica BOND
TTF-1	PDM104	8G7G3/1	RTU	*H2(20)	15 min.	Refine	Leica BOND
WT1	MOB437	6F-H2	1:100	CC1	24 min 37°C	OptiView	Benchmark


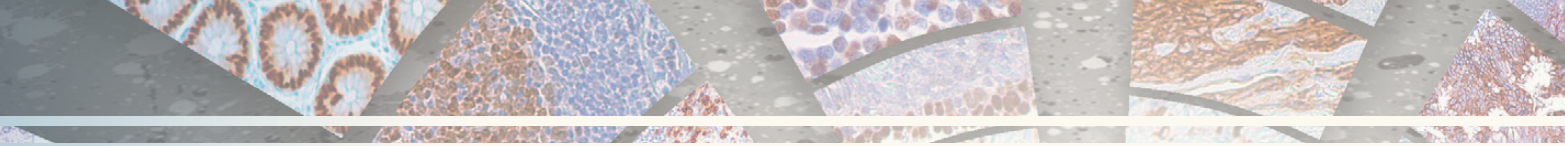


Diese optimierten Protokolle zu Diagnostik BioSystems Antikörpern basieren auf Rückmeldungen von Kunden und sind lediglich Vorschläge.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an das Produktmanagement (Tel.: 04103 8006-8485) oder den jeweiligen Außendienst in Ihrem Gebiet.




medac GmbH ist offizieller Vertreiber von DBS Produkten

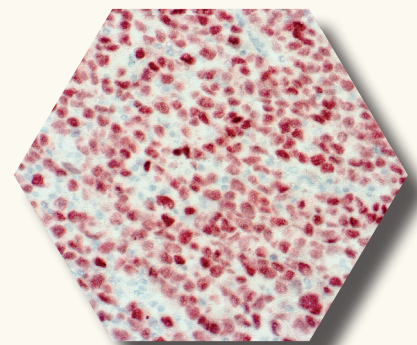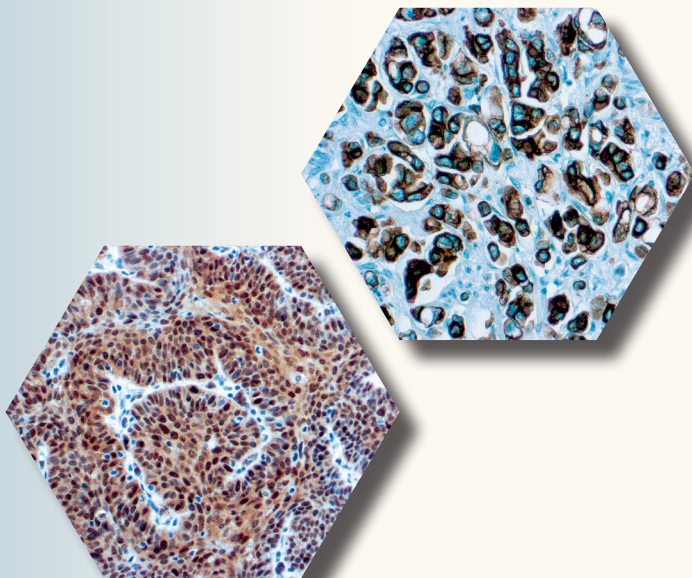

medac

Informationen aus erster Hand
www.medac-diagnostika.de

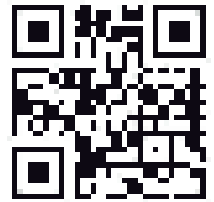

Notizen



Vom Sehen
zum Erkennen.

medac GmbH
Diagnostika
Theaterstraße 6
22880 Wedel
Telefon: +49 (0)4103 8006-8485
Fax: +49 (0)4103 8006-359
E-mail: diagnostika@medac.de
www.medac-diagnostika.de