

Cell Marque Primärantikörper - optimierte Protokolle für IHC-Vollautomaten



Protokolle für Cell Marque Antikörper auf dem Omnis™ System

Antikörper	Klon	Spezies	Kat. Nr.	Verdünnung	Gewebevor- behandlung*	Inkubation			
						Primär-Ak bei 37°C	Sekundär- Ak	HRP	DAB
Androgen Receptor	SP107	Rabbit	200R-18	RTU	High	25	10	25	5
Arginase-1	SP156	Rabbit	380R-18	RTU	Low	10		10	5
Beta-Catenin	14	Mouse	224M-18	RTU	High	25	10	20	5
BK Virus	MRQ-4	Mouse	351M-16	50	High	25	10	20	5
BOB.1	SP92	Rabbit	294R-18	RTU	Low	20	10	20	5
C4d	SP91	Rabbit	404R-18	RTU	High	25	10	25	10
Calponin	EP798Y	Rabbit	231R-18	RTU	Low	20		20	5
CAIX	CAIX	Mouse	379M-18	RTU	High	20	10	20	5

Antikörper	Klon	Spezies	Kat. Nr.	Verdünnung	Gewebevor- behandlung*	Inkubation			
						Primär-Ak bei 37°C	Sekundär- Ak	HRP	DAB
Cathepsin K	3F9	Mouse	420M-18	RTU	Low	10		10	5
CD13	SP187	Rabbit	113R-18	RTU	High	10		10	5
CD14	EPR3653	Rabbit	114R-18	RTU	High	20	10	20	5
CD25	4C9	Mouse	125M-18	RTU	High	25	10	25	5
CD33	PWS44	Mouse	133M-18	RTU	High	20	10	20	5
CD35	RLB25	Mouse	135M-18	RTU	High	25	10	25	5
Cytokeratin 14	SP53	Rabbit	314R-18	RTU	High	20	10	20	5
c-kit (CD117)	YR145	Rabbit	117R-18	RTU	Low	10		10	5
Collagen IV	CIV22	Mouse	239M-18	RTU	High	20		20	5
DOG1	SP31	Rabbit	244R-18	RTU	High	20		20	5
EBV	CS1-4	Mouse	245M-18	RTU	High	20	10	20	5
Factor XIIIa	EP3372	Rabbit	251R-18	RTU	High	20		20	5
Fascin	55k-2	Mouse	252M-18	RTU	High	20		20	5
Fli-1	MRQ-1	Mouse	254M-18	RTU	High	30	10	30	10
Glut1	Poly	Rabbit	355A-18	RTU	High	20		20	5
Glycophorin A	GA-R2	Mouse	260M-18	RTU	High	20		15	5
Glypican-3	1G12	Mouse	261M-98	RTU	High	10		10	5
Granzyme B	Poly	Rabbit	262A-18	RTU	Low	20	10	20	5
H. pylori	Poly	Rabbit	215A-70	RTU	High	20	10	20	5
HBME-1	HBME-1	Mouse	283M-18	RTU	High	20	10	20	5
Hemoglobin A	EPR3608	Rabbit	360R-18	RTU	High	20		20	5
HHV8	13B10	Mouse	265M-18	RTU	High	20	10	20	5
HSV II	Poly	Rabbit	362A-18	RTU	High	20		10	5
IgG4	MRQ-44	Mouse	367M-18	RTU	High	25	10	20	5
INI-1	MRQ-27	Mouse	272M-18	RTU	High	25	10	25	5
Langerin (CD207)	12D6	Mouse	392M-18	RTU	High	20	10	20	5
Lysozyme	Poly	Rabbit	278A-18	RTU	Low	10		10	5
Mammaglobin	31A5	Rabbit	280R-18	RTU	High	25	10	25	5
MITF	C5/D5	Mouse	284M-98	RTU	High	30		15	5
MyoD1	EP212	Rabbit	386R-18	RTU	High	20	10	20	5
Myoglobin	Poly	Rabbit	297A-78	RTU	High	20		20	5
Napsin A	Poly	Rabbit	352A-78	RTU	High	15		10	5
Oct2	MRQ-2	Mouse	308M-18	RTU	High	20	10	20	5
Oct4	MRQ-10	Mouse	309M-18	RTU	High	15	10	15	5
Parvovirus	R92F6	Mouse	218M-18	RTU	High	20	10	20	5
Pax2	Poly	Rabbit	311A-18	RTU	High	15		15	5
Pax8	MRQ-50	Mouse	363M-18	RTU	High	25	10	25	5
PGP 9.5	Poly	Rabbit	318A-18	RTU	Low	15		15	5
PSAP	PASE/4LJ	Mouse	326M-18	RTU	High	10		10	5
Smoothelin	R4A	Mouse	377M-18	RTU	High	20		20	5
Sox10	Poly	Rabbit	383A-78	RTU	Low	20		20	5
Sox11	MRQ-58	Mouse	382M-18	RTU	High	10	10	10	5
TFE3	MRQ-37	Rabbit	354R-18	RTU	Low	25	10	25	5
Thrombomodulin	1009	Mouse	339M-18	RTU	Low	20	10	20	5
TIA-1	EP243	Rabbit	381R-18	RTU	High	25	10	25	5
TLE1	1F5	Mouse	401M-18	RTU	High	20	10	20	5
Uroplakin III	SP73	Rabbit	345R-18	RTU	High	25	10	25	5

Für weitere Marker fordern Sie bitte den aktuellen Cell Marque Katalog sowie das dazugehörige Supplement an.

* Puffer für Epitopdemaskierung

Low = pH6

High = pH9

Informationen aus erster Hand
www.medac-diagnostika.de



medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH • Diagnostika • Theaterstrasse 6 • D-22880 Wedel
Telefon 04103/8006-342 • Fax 04103/8006-359 • www.medac-diagnostika.de • diagnostika@medac.de