

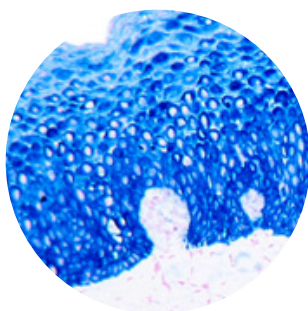


PermaRed - das rote AP-Referenzchromogen


- brillante, kontrastreiche Darstellung
- hohe Sensitivität
- permanent eindeckbar
- für Einfach-/Mehrfachfärbungen, Dermatopathologie, Hämatopathologie, etc.
- muss nicht frisch angesetzt werden (z.B. Über-Nacht-Färbeläufe)
- keine Unterbrechung des Färbelaufs (On-slide Mixing möglich)

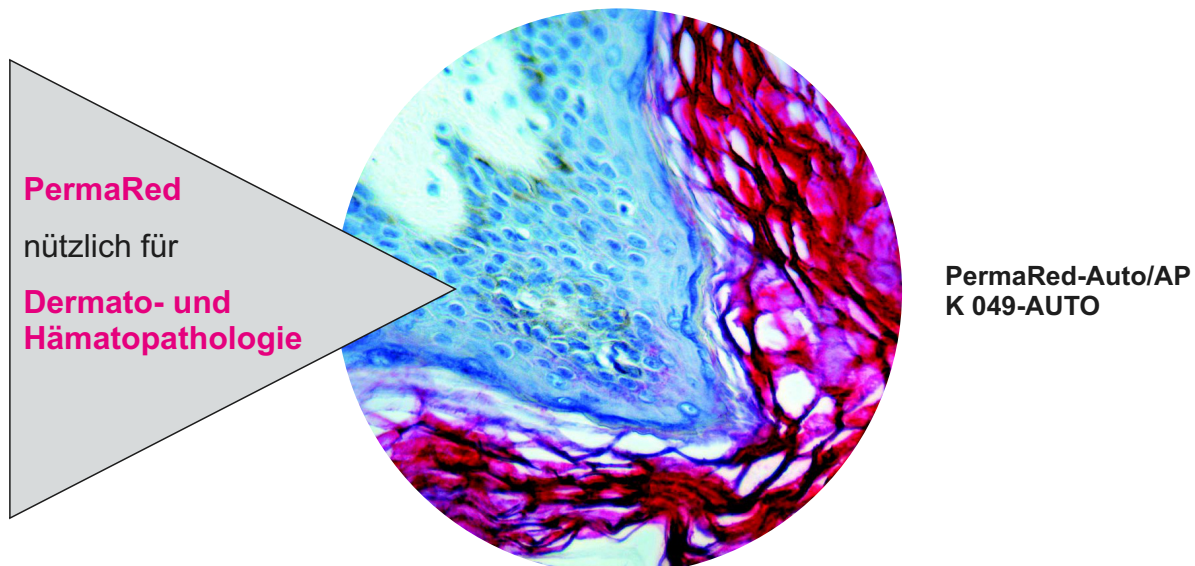

PermaBlue Plus/AP
K 058

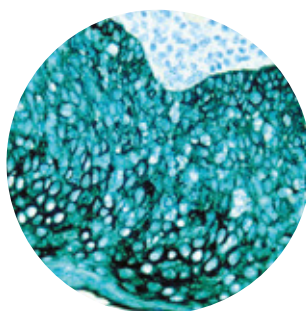

PermaGreen Plus/AP
K 059

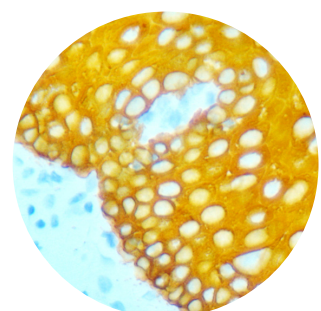


PermaYellow/HRP
K 060

NEU


Mehr Farben für IHC & ISH – freuen Sie sich grün & blau

medac




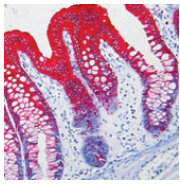


PermaRed/AP ist eine Substrat-Chromogenlösung für Immunhistochemie und *in situ*-Hybridisierung mit Alkalischer Phosphatase. PermaRed/AP erzeugt eine rosa- bis tief rote Farbe mit brillanter und sehr sensibler Darstellung. Die Farbreaktion bei Raumtemperatur ist in nur 10-20 min abgeschlossen. PermaRed/AP ist in Alkohol und Xylol stabil und kann daher **permanent** eingedeckt werden.

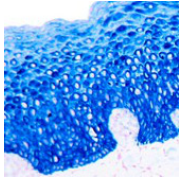


PermaBlue Plus/AP ist eine Substrat-Chromogenlösung für Immunhistochemie und *in situ*-Hybridisierung mit Alkalischer Phosphatase. PermaBlue Plus/AP erzeugt eine leuchtend blaue Farbe. Das Substrat ist alkoholstabil und kann nach Entwässerung mit Xylol-Ersatzmittel oder Lufttrocknung **permanent** eingedeckt werden. Die Farbreaktion bei Raumtemperatur ist in nur 10-20 min abgeschlossen.

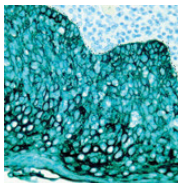

PermaGreen Plus/AP ist eine blaugrüne (dunkel türkisfarbene) Substrat-Chromogenlösung für Immunhistochemie und *in situ*-Hybridisierung mit Alkalischer Phosphatase; die Farbreaktion ist in 10-20 min abgeschlossen. PermaGreen Plus/AP ist alkoholstabil und kann nach Entwässerung mit Xylol-Ersatzmittel oder Lufttrocknung **permanent** eingedeckt werden.

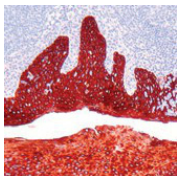

Mono AEC/Plus ist eine stabile, gebrauchsfertige AEC Chromogenlösung für Immunperoxidase (HRP)-Färbungen. Mono AEC/Plus erzeugt eine leuchtend rote Farbe, die gut mit der blauen Hämatoxylin-Gegenfärbung kontrastiert. Die Farbreaktion ist in nur 5-15 min abgeschlossen. Das gebrauchsfertige Format spart Pipettier-Zeit; unverbrauchte Chromogenlösung bleibt stabil und braucht nicht verworfen zu werden.

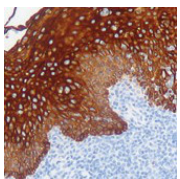

Stable DAB/Plus. DAB ist das meistverwendete Chromogen für Immunperoxidase (HRP)-Färbungen und wird geschätzt wegen seiner hohen Sensitivität, dem präzisen Farbniederschlag und hohen Farbkontrast sowie seiner Stabilität in organischen Lösungsmitteln (**permanent** eindeckbar). Stable DAB/Plus ist sensibler als herkömmliche DAB-Chromogenlösungen und bietet kosteneffiziente Ergebnisse durch reduzierte Inkubationszeiten bzw. höhere Primärantikörper-Verdünnungen. Die angesetzte DAB/Plus-Gebrauchslösung bleibt **2 Wochen stabil** und spart damit Zeit bzw. vermeidet unnötigen Abfall.

Bestell-Information

Tel. 04103/8006-111

Chromogen	LT	Alkohol	Xylol (Permanentes Eindecken auf Xylol-Basis)	Xylolersatz (Permanentes Eindecken, Xylol- frei)	Wässriges Eindecken	Menge	Katalog-Nr.
PermaRed/AP-Auto	-	ok	ok	ok	ok	30 ml	K 049-AUTO
PermaRed/AP-Auto	-	ok	ok	ok	ok	110 ml	K 049-110-AUTO
PermaBlue Plus/AP	+	ok	nein	ok	ok	30 ml	K 058-30
PermaBlue Plus/AP	+	ok	nein	ok	ok	110 ml	K 058-110
PermaGreen Plus/AP	+	ok	nein	ok	ok	30 ml	K 059-30
PermaGreen Plus/AP	+	ok	nein	ok	ok	110 ml	K 059-110
PermaYellow/HRP*	+	nein	ok	ok	ok	1 ml / 30 ml	K 060
PermaYellow/HRP*	+	nein	ok	ok	ok	3 ml / 110 ml	K 060-110
Mono AEC/Plus (HRP)	-	nein	nein	nein	ok	30 ml rtu	K 050
Mono AEC/Plus (HRP)	-	nein	nein	nein	ok	110 ml rtu	K 050-110
Stable DAB/Plus (HRP)	-	ok	ok	ok	ok	5 ml / 200 ml	K 047
DAB Enhancer (HRP)	-	ok	ok	ok	ok	15 ml rtu	K 045

LT: Lufttrocknung nach Chromogensschritt+wässr. Spülschritt **empfohlen**

ok = stabil nein = instabil rtu = gebrauchsfertig

*PermaYellow kann nach A. dest./Lufttrocknung permanent eingedeckt werden